

OrtoCane

Órteses veterinárias protetoras e estabilizadoras



CATÁLOGO

ÓRTESE PARA CARPO



Uso sob prescrição veterinária:

Antes e após cirurgias.
Tratamentos paliativos e conservativos.
Hiperflexão e hiperextensão.
Desvio angular varus e valgus.

Doenças articulares como OCD, artrite e artrose, higromas, luxações, tendinites.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:


1 Ajuste o protetor em torno da articulação do carpo e prenda-o com as faixas de velcro, dando a pressão e estabilidade que se deseja alcançar.

2 A tala interna pode ser removida pela abertura no verso da órtese, caso não seja necessária.

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do carpo.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

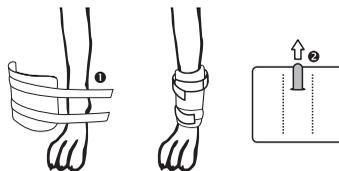

ÓRTESE PARA CARPO LINHA DUO



Uso sob prescrição veterinária: Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Hiperflexão e hiperextensão, desvio angular varus e valgus. Doenças articulares como OCD, artrite e artrose, higromas, luxações, tendinites etc.

Características: Permite o uso no membro direito e no esquerdo. **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:


1 Ajuste o protetor em torno da articulação do carpo e prenda-o com as faixas de velcro, dando a pressão e estabilidade que se deseja alcançar.

2 As talas internas podem ser removidas pelas aberturas no verso da órtese, caso não sejam necessárias.

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do carpo.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

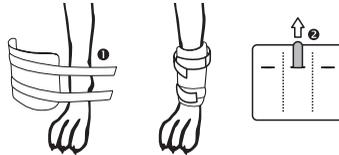




ÓRTESE PARA JOELHO

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria da coxa.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	10 a 14 cm
PPP	14,5 a 18 cm
PP	18,5 a 22 cm
P	22,5 a 26 cm
M	26,5 a 31 cm
G	31,5 a 36 cm
GG	36,5 a 41 cm
GGG	41,5 a 48 cm

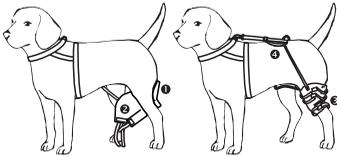

Uso sob prescrição veterinária:

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos.

Lesões de ligamento cruzado e de menisco; doenças articulares como artrite e artrose, luxação da patela, tendinites.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

- Com a órtese aberta, envolva o joelho alinhando-o com o centro da órtese.
 - Ajuste a peça fechando pelos velcros das abas superior e inferior.
 - Contorne as tiras de velcro pela coxa, prendendo em seu par e dando a pressão desejada.
 - Passo e prenda a alça pelo dorso. Se necessário, para evitar a queda desta alça, use o extensor elástico prendendo-o em uma coleira ou peitoral (não acompanha o produto).
- Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural do joelho.
- Em machos passe a alça em torno da pelve e na frente do prepúcio para não comprimir a uretra.




ÓRTESE PARA JOELHO

LINHA DUO

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria da coxa.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	10 a 14 cm
PPP	14,5 a 18 cm
PP	18,5 a 22 cm
P	22,5 a 26 cm
M	26,5 a 31 cm
G	31,5 a 36 cm
GG	36,5 a 41 cm
GGG	41,5 a 48 cm

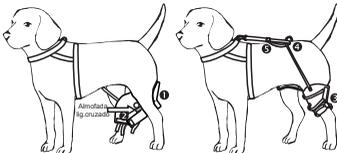

Uso sob prescrição veterinária: Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Lesões de ligamento cruzado. Luxação da patela.

Características: Lateralidade específica da órtese (lado direito diferente do esquerdo). **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

- Com a órtese aberta, envolva o joelho alinhando-o com o centro da órtese.
 - Ajuste a peça fechando pelos velcros das abas superior e inferior.
 - Contorne as tiras de velcro pela coxa, prendendo em seu par e dando a pressão desejada.
 - Passo e prenda a alça pelo dorso. Se necessário, para evitar a queda desta alça, use o extensor elástico prendendo-o em uma coleira ou peitoral (não acompanha o produto).
- Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural do joelho. Em machos passe a alça em torno da pelve e na frente do prepúcio para não comprimir a uretra.
- A almofada deve ser usada em trauma de ligamento cruzado podendo ser reposicionada ou removida.

ÓRTESE PARA JOELHO LINHA PRATI



Uso sob prescrição veterinária:

Prevenção e tratamento de lesões crônicas ou agudas do joelho: entorses e contusões, pré e pós cirúrgica, reabilitação de fraturas, lesões de ligamentos e tendões, artrite, condromalácia, tendinite lesões patelares, auxilia na reabilitação e ainda auxilia na prevenção de lesões durante a prática de exercício.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo. Possui elástico localizado na parte inferior da articulação que evita o movimento de cisalhamento. O orifício central reduz a pressão na região patelar.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.


Instruções de colocação:

- 1 Com a órtese aberta, envolva o joelho alinhando-o com o centro da órtese.
- 2 Ajuste a peça fechando pelos velcros das abas superior e inferior.
- 3 Passe e prenda a alça pelo dorso. Se necessário, para evitar a queda desta alça, use o extensor elástico prendendo-o em uma coleira ou peitoral (não acompanha o produto).

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural do joelho. Em machos passe a alça em torno da pelve e na frente do prepúcio para não comprimir a uretra.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria da coxa.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	10 a 14 cm
PPP	14,5 a 18 cm
PP	18,5 a 22 cm
P	22,5 a 26 cm
M	26,5 a 31 cm
G	31,5 a 36 cm
GG	36,5 a 41 cm
GGG	41,5 a 48 cm

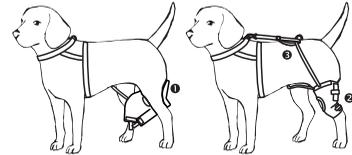

ÓRTESE PARA JOELHO MODELO BORBOLETA



Uso sob prescrição veterinária.

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada.

Produto não estéril.

Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

- 1 Com a órtese aberta, envolva o joelho alinhando-o com o centro da órtese.


- 2 Ajuste a peça fechando pelos velcros das abas superior e inferior.

- 3 Passe e prenda a alça pelo dorso. Se necessário, para evitar a queda desta alça, use o extensor elástico prendendo-o em uma coleira ou peitoral (não acompanha o produto).

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural do joelho. Em machos passe a alça em torno da pelve e na frente do prepúcio para não comprimir a uretra.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria da coxa.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	10 a 14 cm
PPP	14,5 a 18 cm
PP	18,5 a 22 cm
P	22,5 a 26 cm
M	26,5 a 31 cm
G	31,5 a 36 cm
GG	36,5 a 41 cm
GGG	41,5 a 48 cm

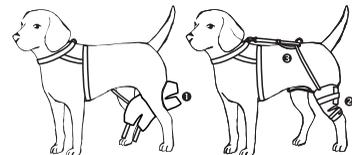




ÓRTESE PARA TARSO

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do tarso.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

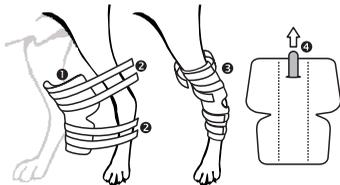

Uso sob prescrição veterinária:

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos.

Casos leves de hiperflexão e hiperextensão. Doenças articulares como OCD, artrite e artrose, luxações, tendinites.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

❶ Observe a posição correta de colocação da órtese: O lado com as abas maiores é para cima e a abertura é posterior para encaixar a articulação e permitir a sua angulação normal.

❷ Ajuste a órtese em torno da articulação do tarso e prenda-o com as faixas de velcro, dando a pressão e estabilidade que se deseja alcançar.

❸ Fixe a órtese com as tiras de velcro para que fique firme no lugar.

❹ Caso não seja necessária, a tala pode ser retirada pela abertura no lado interno.

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.




ÓRTESE PARA TARSO

LINHA DUO - ANTI HIPEREXTENSÃO

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do cotovelo.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

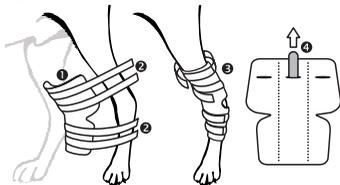

Uso sob prescrição veterinária:

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Hiperextensão e em casos leves de hiperflexão em raças pequenas. Doenças articulares como OCD, artrite e artrose, luxações, tendinites.

Características: Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:


❶ Observe a posição correta de colocação da órtese: O lado com as abas maiores é para cima e a abertura é posterior para encaixar a articulação e permitir a sua angulação normal.

❷ Ajuste a órtese em torno da articulação do tarso e prenda-o com as faixas de velcro, dando a pressão e estabilidade que se deseja alcançar.

❸ Fixe a órtese com as tiras de velcro para que fique firme no lugar.

❹ Caso não seja necessária, a tala pode ser retirada pela abertura no lado interno.

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.

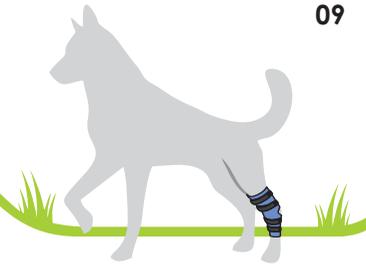

ÓRTESE PARA TARSO

LINHA PRATI - ANTI HIPERFLEXÃO

Uso sob prescrição veterinária.

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Hiperflexão de tarso.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.



Instruções de colocação:

- 1 Observe a posição correta de colocação da órtese: O lado com as abas maiores é para cima e a abertura é para traz para encaixar a articulação e permitir a sua angulação normal.
 - 2 Ajuste o protetor em torno da articulação do tarso e prenda-o com as faixas de velcro, dando a pressão e estabilidade que se deseja alcançar.
 - 3 Fixe a órtese com as tiras de velcro para que fique firme no lugar.
 - 4 Observe que o furo deve estar exatamente no tarso. A faixa central é a que faz força para atingir a correção desejada da hiperflexão.
- Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do membro.

TAMANHO	PERIMETRIA
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

Os tamanhos pequenos são atendidos pela pela órtese de tarso anti hiperextensão da linha DUO.

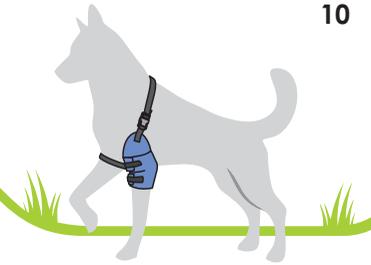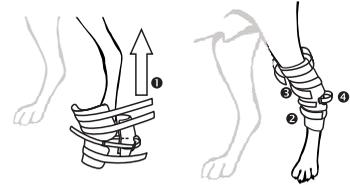

ÓRTESE PARA COTOVELO

Uso sob prescrição veterinária.

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Doenças articulares como OCD, artrite e artrose, hígromas, calos no cotovelo luxações, tendinites.

Características:

Lateralidade específica da órtese (lado direito diferente do esquerdo).


Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.


Instruções de colocação:

- 1 Vista a órtese no braço do animal, ajustando-a para cima.
 - 2 Feche as tiras de velcro para dar a compressão pretendida.
 - 3 Coloque no outro braço a alça de sustentação contornando o dorso.
 - 4 Prenda o fecho plástico e ajuste o comprimento da alça.
- Tenha cuidado para não ferir o cão durante a colocação. Respeite a posição natural das articulações.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do cotovelo.

TAMANHO	PERIMETRIA
PPP	10 a 12 cm
PP	12,5 a 14 cm
P	14,5 a 16 cm
M	16,5 a 19 cm
G	19,5 a 22 cm
GG	22,5 a 25 cm
GGG	25,5 a 28 cm

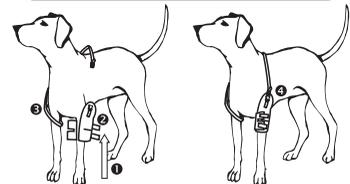


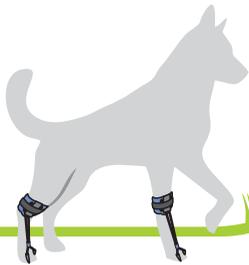

ÓRTESE PARA DÉFICIT PROPRIOCEPTIVO

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do membro.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

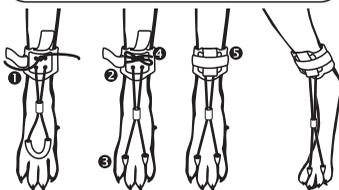

Uso sob prescrição veterinária: Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Déficit proprioceptivo. Doenças neurológicas, paralisia dos membros, danos ao nervo ciático.

Características: Permite o uso no membro direito e no esquerdo, torácico ou pélvico. **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Recomendações: O elástico interdígitos só deve ser usado durante a fisioterapia ou exercícios dirigidos. Não é recomendada para uso prolongado ou contínuo, pois devido à falta de sensibilidade nos dedos, o elástico pode acabar machucando o animal.

Sugestão: Coloque a costura do reforço do elástico virada para fora da pata para evitar esfregar a costura entre os dígitos.

Instruções de colocação:

- 1 Certifique-se que o elástico esteja passando pelos ilhóses.
- 2 Fixe a órtese acima da articulação, prendendo a tira no primeiro velcro.
- 3 Coloque o elástico entre os dedos do animal.
- 4 Ajuste o elástico dando a tensão desejada e dê um nó que permita ser desatado facilmente e possa ser ajustado para regular a tensão, acertando assim a abertura das falanges do cão.
- 5 Abaixar a proteção do nó e prenda-o com o velcro. O reforço em Neoprene no elástico pode ser utilizado em casos graves de hiperflexão das falanges, garantindo que elas abram. Pode ser removido se não for necessário.


Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.



CALÇADO PARA TRAÇÃO DE DÍGITOS

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela medindo o contorno da pata.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	5 a 7 cm
PPP	7,5 a 9 cm
PP	9,5 a 11 cm
P	11,5 a 13 cm
M	13,5 a 16 cm
G	16,5 a 19 cm
GG	19,5 a 23 cm
GGG	23,5 a 26 cm

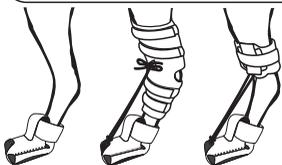

Sugestões de uso do calçado, órteses para larso e déficit proprioceptivo não-inclusas.

Uso sob prescrição veterinária.

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos.

Déficit proprioceptivo. Doenças neurológicas, paralisia dos membros, danos ao nervo ciático. Tração e proteção dos dígitos.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo, torácico ou pélvico. Solado antiderrapante, não indicado para arrasto. **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

Certifique-se que o elástico esteja passando pelos ilhóses do protetor.

Calce a órtese no animal e feche com o velcro.

Amarre o elástico na estrutura de fixação da órtese escolhida. Pode ser usado associado a uma órtese para déficit proprioceptivo ou outra órtese que possua estrutura para sua fixação. Os calçados para tração dos dígitos são ideais para alternância ao elástico tensor da órtese para déficit proprioceptivo, permitindo tempo maior de estímulo dos tendões flexores sem machucar o animal.

Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.



ÓRTESE BOTA COM TALA

Uso sob prescrição veterinária.

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Doenças articulares como OCD, artrite e artrose, hiperflexão, luxações, tendinites.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo, torácico ou pélvico. Possui sola de borracha antiderrapante, **não sendo adequada para animais que arrastam o membro**. Nesses casos é necessário o uso do acessório meia de arrasto.



Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

- 1 Vista a bota no membro afetado (torácico, pélvico, direito ou esquerdo) fechando as tiras de velcro contornando a pata.
 - 2 Finalize a colocação ajustando as os velcros frontais cruzando-os sobre o dorso da pata prendendo-os no velcro da parte de traz da bota. Tome cuidado em manter a língua protetora cobrindo o dorso da pata para evitar esfoladelas.
- Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Respeite a posição natural da articulação.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do membro.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

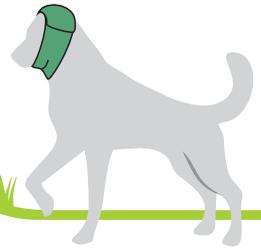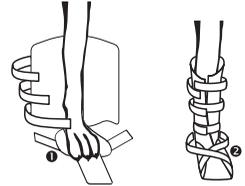

ÓRTESE PROTETORA DE ORELHAS

Uso sob prescrição veterinária.

Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Otohematoma.

Durante exercício na hidroesteira.

Procedimentos odontológicos.

Características:


Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.


Instruções de colocação:

- 1 Coloque o protetor envolvendo a cabeça do animal protegendo as orelhas.
- 2 Feche pela parte superior ajustando pelo velcro de fixação.
- 3 Observe que na parte inferior há uma prega que define e modela a peça. A parte mais estreita deve ser acomodada no pescoço e a mais longa ficar sob a mandíbula do animal.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela abaixo medindo o contorno da cabeça.

TAMANHO	PERIMETRIA
PP	22 a 30 cm
P	30,5 a 40 cm
M	40,5 a 50 cm
G	50,5 a 63 cm
GG	63,5 a 75 cm

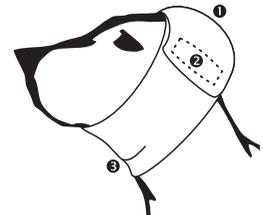

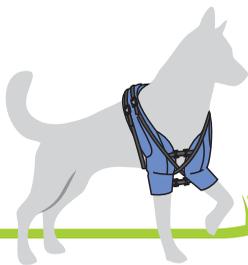


ÓRTESE PARA OMBROS

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do cotovelo.

TAMANHO	PERIMETRIA
PPP	10 a 12 cm
PP	12,5 a 14 cm
P	14,5 a 16 cm
M	16,5 a 19 cm
G	19,5 a 22 cm
GG	22,5 a 25 cm
GGG	25,5 a 28 cm

Uso sob prescrição veterinária: Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. **Características:** **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Medidas para execução de órtese sob medida:

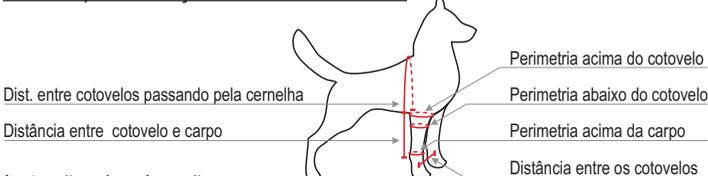

Instruções de colocação:

- 1 Abra os velcros e vista cada uma das laterais da órtese para ombros nos braços do animal, de modo que as aberturas fiquem alinhadas com os cotovelos.
- 2 Feche as tiras de velcro para dar a compressão pretendida.
- 3 Prenda os fechos plástico no dorso e ajuste os comprimentos das alças.
- 4 Coloque as algemas que interligam as laterais da órtese. Tenha cuidado para não ferir o cão durante a colocação. Respeite a posição natural das articulações.



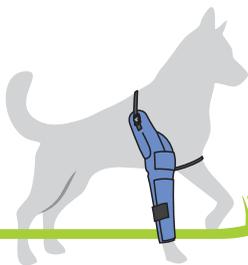


Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do cotovelo.

TAMANHO	PERIMETRIA
PPP	10 a 12 cm
PP	12,5 a 14 cm
P	14,5 a 16 cm
M	16,5 a 19 cm
G	19,5 a 22 cm
GG	22,5 a 25 cm
GGG	25,5 a 28 cm


Uso sob prescrição veterinária: Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. **Características:** **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Medidas para execução de órtese sob medida:

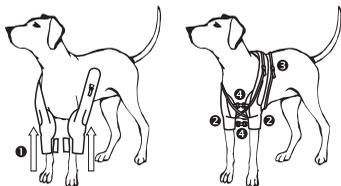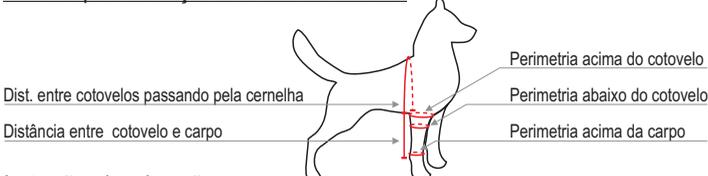

Instruções de colocação:

- 1 Vista a órtese para rádio-ulna no braço do animal, ajustando-a para cima.
- 2 Feche as tiras de velcro para dar a compressão pretendida.
- 3 Coloque no outro braço a alça de sustentação contornando o dorso.
- 4 Prenda o fecho plástico e ajuste o comprimento da alça. Tenha cuidado para não ferir o cão durante a colocação. Respeite a posição natural das articulações.

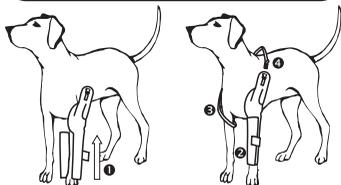


ÓRTESE COXOFEMORAL



Uso sob prescrição veterinária. Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos. Displasia coxo-femoral. Colocefalectomia. Luxação.

Características: **Validade Indeterminada.** Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto. Esta órtese sozinha não coloca o animal em estação.

Medidas para execução de órtese sob medida:

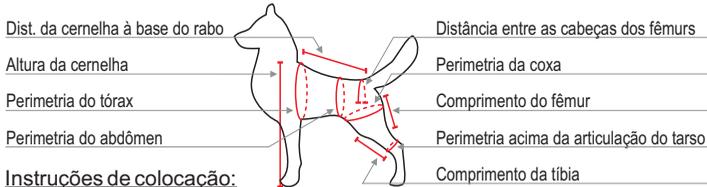


Instruções de colocação:

- 1 Vista a órtese nas pernas do animal.
- 2 Feche os velcros nas costas e atrás das coxas, dando a pressão desejada. Se necessário utilize o extensor de velcro para o fechamento.
- 3 Passe a alça pelo abdômen, ajuste-a e feche a fivela. Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação. Em machos passe a alça em torno da pelve e na frente do prepúcio para não comprimir a uretra.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria da coxa.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	sob medida
PPP	14,5 a 18 cm
PP	18,5 a 22 cm
P	22,5 a 26 cm
M	26,5 a 31 cm
G	31,5 a 36 cm
GG	36,5 a 41 cm
GGG	sob medida

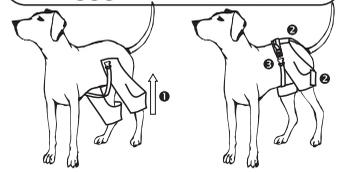

ÓRTESE COLETE

Uso sob prescrição veterinária.


Antes e após cirurgias. Tratamentos paliativos e conservativos.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Medidas para execução de órtese sob medida:

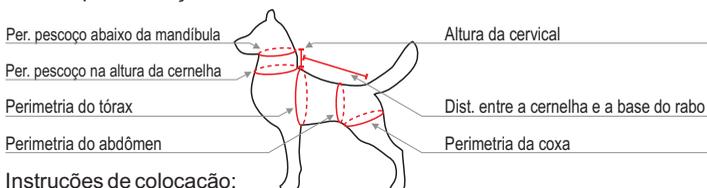



Instruções de colocação:

- 1 Vista a órtese no animal, colocando-a sobre o dorso.
- 2 Feche os velcros abaixo do pescoço e no abdome. Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria do tórax.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	sob medida
PPP	30 a 36 cm
PP	36,5 a 44 cm
P	44,5 a 54 cm
M	54,5 a 66 cm
G	66,5 a 80 cm
GG	80,5 a 92 cm
GGG	sob medida

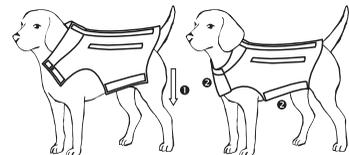

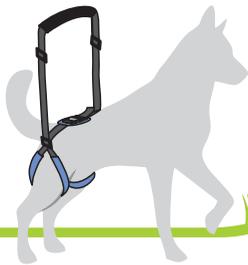

SUPOORTE DE QUADRIL

MODELO AJUSTÁVEL

Este produto é ajustável, atende animais entre 05 e 40 kg.

Uso sob prescrição veterinária:

Tratamentos paliativos e conservativos.
 Displasia. Osteoartrite.
 Desequilíbrio de quadril. Debilidade muscular ou articular.
 Falta de coordenação motora (ataxia).
 Hêmias de disco.
 Sequela de cinomose.


Características:

Permite o uso nos membros torácicos ou pélvicos.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

- 1 Ajuste as alças que envolvem as pernas do animal deslizando os passantes
- 2 Vista o suporte nas pernas e feche a fivela nas costas.
- 3 Ajuste o comprimento da alça de mão deslizando os passantes laterais para que fiquem com uma altura confortável para carregar o cão. O ajuste adequado evita que o suporte escorregue.
- 4 Se necessário, passe o extensor elástico pela fita nas costas e prenda a fivela metálica em uma coleira ou peitoral (não acompanha a órtese).

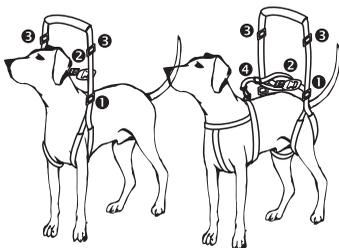

SUPOORTE DE QUADRIL

MODELO OITO

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela fazendo a perimetria da coxa.

TAMANHO	PERIMETRIA
PPP	menor que 15 cm
PP	15,5 a 20 cm
P	20,5 a 25 cm
M	25,5 a 30 cm
G	30,5 a 35 cm
GG	35,5 a 42 cm
GGG	42,5 a 55 cm

Uso sob prescrição veterinária:


Tratamentos paliativos e conservativos.
 Displasia. Osteoartrite.
 Desequilíbrio de quadril. Debilidade muscular ou articular.
 Falta de coordenação motora (ataxia).
 Hêmias de disco.
 Sequela de cinomose.

Características:

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

- 1 Vista o suporte nas pernas do animal.
- 2 Feche as fivelas nas costas e regule-as. O ajuste evita que o suporte de quadril escorregue.
- 3 Ajuste o comprimento das alças deslizando os passantes laterais para que fiquem com uma altura confortável para carregar o cão.
- 4 Fixe as alças de mão no suporte. Nos momentos de repouso, para conforto do animal, as alças podem ser removidas.

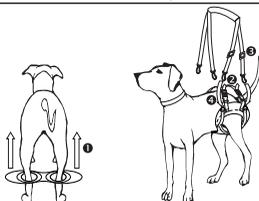



SUPOORTE PEITORAL LINHA PRATI

Uso sob prescrição veterinária:

Tratamentos paliativos e conservativos.

Displasia. Osteoartrite.

Desequilíbrio de quadril.

Debilidade muscular ou articular.

Falta de coordenação motora (ataxia).

Hérnias de disco.

Sequela de cinomose.

Características:

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:



1 Vista o ascensor nos braços do animal.

2 Feche a fivela plástica nas costas.

3 Ajuste o comprimento das alças deslizando os passantes laterais para que fiquem com uma altura confortável para carregar o animal. Fixe as alças de mão no suporte. Nos momentos de repouso, para conforto do animal, as alças podem ser removidas.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela abaixo medindo o contorno do tórax.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	sob medida
PPP	30 a 36 cm
PP	36,5 a 44 cm
P	44,5 a 54 cm
M	54,5 a 66 cm
G	66,5 a 80 cm
GG	80,5 a 92 cm
GGG	sob medida

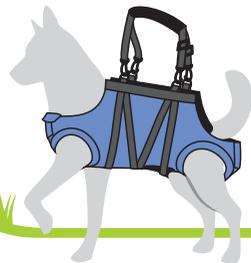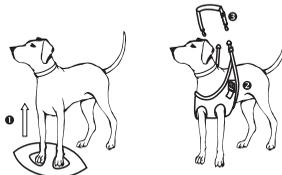

CESTO DE TRANSPORTE

Uso sob prescrição veterinária:

Tratamentos paliativos e conservativos.

Displasia. Osteoartrite.

Desequilíbrio de quadril.

Debilidade muscular ou articular.

Falta de coordenação motora (ataxia).

Hérnias de disco.

Sequela de cinomose.

Características:

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:

1 Vista o cesto nas pernas e braços do animal.

2 Feche os velcros abaixo do pescoço e do rabo.

3 Ajuste o comprimento das alças deslizando os passantes laterais para que fiquem com uma altura confortável para carregar o cão. Fixe as alças de mão no suporte. Nos momentos de repouso, para conforto do animal, as alças podem ser removidas.

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela abaixo medindo o contorno do tórax.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	sob medida
PPP	30 a 36 cm
PP	36,5 a 44 cm
P	44,5 a 54 cm
M	54,5 a 66 cm
G	66,5 a 80 cm
GG	80,5 a 92 cm
GGG	sob medida





ASCENSOR TORÁCICO

LINHA PRATI

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela abaixo medindo o contorno do tórax.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	sob medida
PPP	30 a 36 cm
PP	36,5 a 44 cm
P	44,5 a 54 cm
M	54,5 a 66 cm
G	66,5 a 80 cm
GG	80,5 a 92 cm
GGG	sob medida



Uso sob prescrição veterinária:

Tratamentos paliativos e conservativos.

Displasia. Osteoartrite.

Desequilíbrio de quadril.

Debilidade muscular ou articular.

Falta de coordenação motora (ataxia).

Hérnias de disco.

Sequela de cinomose.

Características:

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.


Instruções de colocação:

❶ Vista o ascensor no corpo do animal.

❷ Feche o velcro das costas.

❸ Ajuste e feche a fivela plástica na lateral do suporte.


❹ Ajuste o comprimento das alças deslizando os passantes laterais para que fiquem com uma altura confortável para carregar o animal. Fixe as alças de mão no suporte. Nos momentos de repouso, para conforto do animal, as alças podem ser removidas.

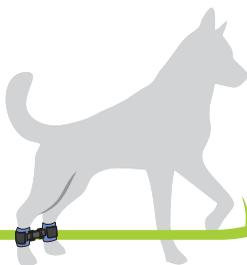

ALGEMAS

Tabela de tamanhos: Determine o tamanho da órtese na tabela abaixo fazendo a perimetria do membro.

TAMANHO	PERIMETRIA
MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

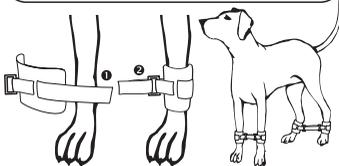

Uso sob prescrição veterinária:

Para uso em exercícios durante a fisioterapia ou outro tratamento indicado por veterinário.

Síndrome do cão nadador.

Características:

Permite o uso no membro direito e no esquerdo, torácico ou pélvico.

Validade Indeterminada. Produto não estéril. Imagens ilustrativas, podem apresentar diferenças do produto.

Instruções de colocação:


❶ Ajuste cada uma das algemas em torno dos membros desejados prendendo-as com o velcro.

❷ Passe a tira pelas argolas, dê a distância desejada e feche os velcros. Tenha cuidado para não ferir o animal durante a colocação.

TABELA GERAL DE MEDIDAS

PERIMETRIA DO CARPO


ÓRTESES PARA CARPO
BOTA COM TALA
DÉFICIT PROPRIOCEPTIVO
ALGEMAS

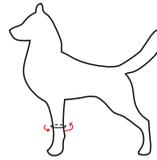

MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

PERIMETRIA DO TARSO


ÓRTESES PARA TARSO
BOTA COM TALA
DÉFICIT PROPRIOCEPTIVO
ALGEMAS

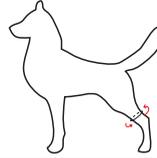

MICRO	3 a 5 cm
PPP	5,5 a 7 cm
PP	7,5 a 9 cm
P	9,5 a 11 cm
M	11,5 a 13 cm
G	13,5 a 16 cm
GG	16,5 a 19 cm
GGG	19,5 a 22 cm

PERIMETRIA DO COTOVELO


ÓRTESE PARA COTOVELO
ÓRTESE PARA OMBROS
ÓRTESE PARA RÁDIO-ULNA

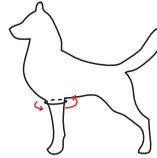

PPP	10 a 12 cm
PP	12,5 a 14 cm
P	14,5 a 16 cm
M	16,5 a 19 cm
G	19,5 a 22 cm
GG	22,5 a 25 cm
GGG	25,5 a 28 cm

PERIMETRIA DA COXA


ÓRTESES PARA JOELHO
ÓRTESE COXOFEMORAL

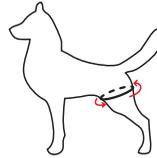

MICRO	10 a 14 cm
PPP	14,5 a 18 cm
PP	18,5 a 22 cm
P	22,5 a 26 cm
M	26,5 a 31 cm
G	31,5 a 36 cm
GG	36,5 a 41 cm
GGG	41,5 a 48 cm

PERIMETRIA DA COXA


SUPOORTE DE QUADRIL

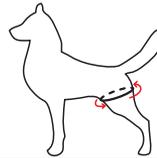

PPP	até 15 cm
PP	15,5 a 20 cm
P	20,5 a 25 cm
M	25,5 a 30 cm
G	30,5 a 35 cm
GG	35,5 a 42 cm
GGG	42,5 a 55 cm

PERIMETRIA DA PATA


CALÇADO PARA
TRAÇÃO DE DÍGITOS

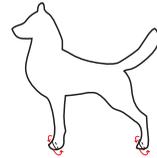

MICRO	5 a 7 cm
PPP	7,5 a 9 cm
PP	9,5 a 11 cm
P	11,5 a 13 cm
M	13,5 a 16 cm
G	16,5 a 19 cm
GG	19,5 a 23 cm
GGG	23,5 a 26 cm

PERIMETRIA DO TÓRAX


ÓRTESES COLETE
SUPOORTE PEITORAL
CESTO DE TRANSPORTE

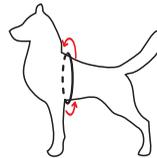

PPP	30 a 36 cm
PP	36,5 a 44 cm
P	44,5 a 54 cm
M	54,5 a 66 cm
G	66,5 a 80 cm
GG	80,5 a 92 cm

PERIMETRIA DA CABEÇA

ÓRTESE PROTETORA
DE ORELHAS

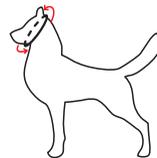

PP	22 a 30 cm
P	30,5 a 40 cm
M	40,5 a 50 cm
G	50,5 a 63 cm
GG	63,5 a 75 cm



Recomendações gerais:

O tempo de uso das órteses é determinado pelo objetivo e tipo de tratamento que está sendo dado ao animal. Com exceção de recomendação expressa do veterinário, a órtese só deve ser utilizada nos períodos de atividade do animal e deve ser retirada durante o repouso. Durante o uso não é aconselhável deixar o animal sozinho. Se necessário utilize um colar Elizabetano. Remova e verifique periodicamente a órtese para evitar esfoladelas e escaras. O uso de meia de gaze é recomendado pois facilita a colocação da órtese em cães peludos, é uma proteção adicional para a pele do animal, aumenta a durabilidade da órtese e deixa seu uso mais higiênico. Todas as órteses da OrtoCane podem ser utilizadas dentro d'água. Após o uso na água remova a órtese para secar a sombra ou no secador em baixa temperatura. Limpe frequentemente a face "gancho" do velcro removendo os pelos do animal para manter a aderência entre os dois lados. Use um instrumento não cortante como um palito de dentes. Para lavar a peça use uma escova macia e sabão neutro. Não deixar de molho nem torcer, secar à sombra. As órteses podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Como medir corretamente as órteses OrtoCane:

Com uma fita métrica em mãos, coloque o animal em estação (em pé sobre os quatro membros) e meça a perímetria (contorno) do membro ou da articulação que irá receber a órtese em sua porção mais larga, conforme tabela própria. As medidas devem ser feitas justas (sem apertar e sem que a fita fique frouxa) com a fita paralela ao chão e em centímetros (cm).

Em caso de dúvidas, entre em contato com a OrtoCane através do WhatsApp (11)94499-5045 ou das redes sociais.

OrtoCane
Órteses veterinárias protetoras e estabilizadoras

 ortocane.com.br
  ortocane@gmail.com
 (11)94499-5045
 
 @ortocane